

Návod k použití přípravků Equi-Thane®

Adhere™ je rychleschnoucí polyuretanové lepidlo konstruované pro lepení hliníkových nebo ocelových podkov a k opravám kopytní stěny.

Pozor:

- **Výrobky Vettec je nejlépe používat při teplotách 18 až 30 °C**
- Ideální je používat při práci latexové nebo gumové rukavice
- **Neohřívajte nebo nepracujte za tepla s těmito výrobky**
- **Používejte pouze směšovací trubičky Vettec**

Příprava tuby:

- K otevření tuby odstraňte štípacími kleštěmi špičku na značce. Vložte tubu do aplikační pistole. Před nasazením směšovací trubičky promíchejte tubu vymáčknutím malého množství tmelu tak, aby se zajistilo, že obě složky tmelu budou vytlačeny rovnoměrně. Nasadte trubičku zatlačením a otočením ve směru hodinových ručiček.
- Po ukončení práce zaštipněte trubičku a ponechte ji jako víčko.
- Před další aplikací znovu promíchejte tubu a nasadte novou trubičku.

Příprava podkovy:

- Doporučuje se podkova s čepičkami pro zvýšení stability a dokonalé napasování podkovy.
- Vyrtejte **1cm** otvor mezi druhou a třetí dírou na podkováky na obou ramenech skosený na „zemní“ straně podkovy. Pokud můžete zvětšete i ostatní díry na podkováky vrtákem nebo průbojníkem.
- Obruste nebo orašplujte povrch podkovy pro odstranění rzi, zoxidovaného materiálu a zdrsnění povrchu. Očistěte povrch denaturovaným alkoholem pro odstranění oleje, mastnoty, strusky, nečistot a dokonale vysušte
- Nalepte 3-4 zápalky nebo obdobný materiál okolo vnějších hran podkovy, použijte jiné lepidlo. Vytvoříte tak dostatečný prostor mezi kopytem a podkovou (cca 1,5mm) pro Adhere.

Doporučení: nalepte instalátorskou lepicí pásku na posledních 25 až 30mm ramene podkovy. Zabráni se tak Adhere v zalepení patek podkovy

Příprava kopyta:

- Orašplujte a upravte kopyto jako obvykle. Odstraňte veškerý měkký a slabý materiál na spodní straně kopyta, zejména v oblasti bílé čáry.
- **OSUŠTE DOKONALE KOPYTO** za použití fénu nebo horkovzdušné pistole. Nepřehřívajte kopyto.
- POZOR:** pokud je kopyto mastné, otřete postiženou oblast hadrem namočeným v denaturovaném alkoholu opatrně tak, aby nedošlo k nasáknutí do kopyta. Dokonale kopyto osušte. Nepoužívejte Aceton!

Lepení podkovy:

- naneste Adhere buď na podkovu nebo na kopyto v přibližně 1cm vrstvě na výšku i šířku.
- Rychle a přesně napasujte podkovu. Adhere zaschne během asi jedné minuty.
- Držte kopyto v zvednuté a dávejte pozor, abyste během 2,5 - 4 minut nehýbali dokud Adhere zasychá.

Aplikace za nízkých teplot (pod 18 °C):

Nízké teploty mají za následek dramatické prodloužení doby zasychání Adhere. Příklad: při 0° C se zaschnutí prodlužuje na 7-8 minut.

- skladujte tuby v teple např. v uzavřených půllitrových nádobách naplněných teplou vodou apod.
- za mrazu je nutné podkovy nahřát, aby se zabránilo kondenzaci a zajistilo přilnutí lepidla

Aplikace za vysokých teplot (nad 30°C):

- Adhere zasychá velmi rychle. Ke zpomalení zasychání skladujte materiál v chladícím boxu.

Opravy kopytní stěny za použití Adhere™

POZOR:

- Materiál by neměl překrývat oblasti mokvajících, krvácejících nebo postižené infekcí. Po vyléčení je možné výrobek použít.
- Adhere lze použít s nebo bez podkovy, ale vždy se přilepí k podkově. Pokrytí povrchu podkovy olejem nebo vazelinou zabrání přichycení Adhere k podkově. Dávejte pozor, aby se olej nedostal na opravovanou část kopyta.
- Adhere nebude držet na kopytech, které byly dlouhodobě ošetřovány výrobky obsahujícími: olej, tuky, těr, dehet atd. V těchto případech je třeba kopyto důkladně vyčistit MEK (methyl ethyl ketonem) a vysušit pro zajištění přilnavosti.

Při rozsáhlejších aplikacích, kde může být problémem nárůst teploty při větším množství Adhere, omezte 1.vrstvu na 6mm. Po prvotní fázi schnutí (2-3 min.), naneste další vrstvu do požadované úrovně a tvarujte, jak je nutné.

Příprava kopyta:

Obdobně jako u předešlé aplikace.

Postup:

- Orašplujte, vyrovnejte a očistěte kopyto v okolí poškozeného místa.
- Použijte kopytní nůž a vyřežte poškozenou část
- Vyřežte drážku na kopytní stěně
- Ochraňte korunku kopytní páskou nebo navlhčenou gázou
- Očistěte a dokonale osušte oblast podle instrukcí.

POZOR: pokud je vlhko, měl by kůň ustájen přes noc v dokonale suchém prostředí

- Rozprostřete Adhere přímo na poškozenou část s přesahem na pevnou kopytní stěnu. Neztenčujte vrstvu materiálu okolo okrajů, může to vést k nezdaru. Konturovací plast (kat.č. 46904) se může použít k natlačení

materiálu do mezer. Ponechá se namístě dokud materiál nezatvrdne, potom se odlepi.

- Adhere poskytuje čas k úpravám cca 55 sek. Na tvarování a formování.
- Nechte ho cca 7-8 minut tvrdnout, poté ho zpracujte rašplováním a ořezáním podle kopyta.
- Přibijte podkovu jako obvykle, podkovák projde bez narušení opravovaného místa.
- Pokud je to nutné, po rašplování a podkování, vyplňte otvory a mezery Adhere jako kosmetickou úpravu.

Equi-build®

je samonosný tekutý polyuretan, který garantuje prokazatelný růst stěny, chodidla, střelu a patek (v průměru 2-4° za 4-6

týdnů) vytvořením dokonalého rozložení váhy a jejím sdílením s kopytní stěnou. Equi-build přilne k chodidlu, uzavře

oblast před vlhkostí a blátem, ochraňuje chodidlo a vynikajícím způsobem zlepšuje kondici kopyta.

Dodatečné pozitivní efekty:

Equi-build lze úspěšně použít v případě schvácených a zhroutených kopyt.

Equi-build – jeho pevnost zabraňuje dalšímu zužování patek.

Equi-build stabilizuje podkovu, což má za následek nižší opotřebení a možnost opětovného použití ocelových nebo

hliníkových podkov.

POZOR:

- Materiál by neměl překrývat oblasti mokvajících, krvácejících nebo postižené infekcí. Po vyléčení je možné výrobek použít.

- Výrobky Vettec je nejlépe používat při teplotách 18 až 30 °C

- Neohřívejte nebo nepracujte za tepla s těmito výrobky.

Příprava tuby:

- K otevření tuby odstraňte štípacími kleštěmi špičku na značce. Vložte tubu do aplikační pistole. Před nasazením

směšovací trubičky promíchejte tubu vymáčknutím malého množství tmelu tak, aby se zajistilo, že obě složky tmelu budou vytlačeny rovnoměrně. Nasadte trubičku zatlačením a otočením ve směru hodinových ručiček.

- Po ukončení práce zaštipněte trubičku a ponechte ji jako víčko.

- Před další aplikací znovu promíchejte tubu a nasadte novou trubičku.

Příprava kopyta:

- Orašplujte a upravte kopyto jako obvykle. Odstraňte veškerý měkký a slabý materiál na spodní straně kopyta, zejména v oblasti bílé čáry.

- OSUŠTE DOKONALE KOPYTO za použití fénu nebo horkovzdušné pistole. Nepřehřívejte kopyto.

POZOR: pokud je kopyto mastné, otřete postiženou oblast hadrem namočeným v denaturovaném alkoholu opatrně tak,

aby nedošlo k nasáknutí do kopyta. Dokonale kopyto osušte. Nepoužívejte Aceton

Pracovní postup:

- Vyřežte a vystříhejte chodidlo, nechte na místě část odlupujícího se chodidla.

Ocelovým kartáčem vydrhněte chodidlo. Očistěte a osušte chodidlo fénem nebo horkovzdušnou pistolí.

- Odstráňte kousek Equi- Mesh (kat. č. 46030) nebo jiné plastové síť podle podkovy a umístěte mezi chodidlo a

podkovu pro dokonalejší retenci.

- Přibijte podkovu na kopyto. Pokud chodidlo ploché, doporučuje se podkovu posunout.

- Umístěte 15x15x6cm pěnový plast (kat. č. 46015) na kopyto a nechte koně si na něj stoupnout.

- Namažte vazelínu na hranici srsti nad patky.

- Zvedněte kopyto, vyplňte ho Equi-buildem a zalepte patky instalátorskou lepicí páskou.

- Držte kopyto zvednuté 2 minuty, potom ho položte.

- Odstraňte pěnový plast po 6-ti minutách.

Alternativní metoda:

- Nalepte modelářskou plastelínu na patky jako hráz a zabalte kopyto lepicí páskou tam, kde podkova dosedá na kopyto. Vazelínu naneste na hranici srsti nad patky.

- Za použití směšovací trubičky naneste Equi-build na chodidlo až do výše spodní hrany podkovy.

- Položte na nanesený materiál igelitový obal od tuby nebo obdobný inertní materiál. Rozetřete tlakem dlaně materiál od směrem patek tak, aby se zaplnily všechny mezery. Držte kopyto 2 minuty. Pokud materiál už neteče, položte kopyto na rovný povrch.

- Igelit odstraňte po 6-ti minutách.

Equi-Pak®

Příprava tuby:

- K otevření tuby odstraňte štípacími kleštěmi špičku na značce. Vložte tubu do aplikační pistole. Před nasazením

směšovací trubičky promíchejte tubu vymáčknutím malého množství tmelu tak, aby se zajistilo, že obě složky tmelu budou vytlačeny rovnoměrně. Nasadte trubičku zatlačením a otočením ve směru hodinových ručiček.

- Po ukončení práce zaštipněte trubičku a ponechte ji jako víčko.

- Před další aplikací znovu promíchejte tubu a nasadte novou trubičku.

POZOR:

- Materiál by neměl překrývat oblasti mokvajících, krvácejících nebo postižené infekcí. Po vyléčení je možné výrobek použít.

- Výrobky Vettec je nejlépe používat při teplotách 18 až 30 °C

Neohřívejte nebo nepracujte za tepla s těmito výrobky.

Equi-Pak

Je určen k použití s podložkou nebo bez ní, Equi-Pak je tekutý polyuretanový kopytní balící materiál, který tvrdne po 25 sek. Equi-Pak přilne k chodidlu i k podložce (pokud ji použijete). Brání tak průchodu vlhkosti a znečištění, chrání střel a

chodidlo. Equi-Pak vytváří stabilní „vycpávkovou“ podporu, která udržuje svůj tvar a pružnost neomezeně dlouho. Ať už se

použije s podložkou nebo bez ní, zanechá Equi-Pak chodidlo v excelentní kondici (už nikdy více „sýrovité“ chodidlo). Pokud

se použije k zakrytí aplikovaných léčiv – můžete Equi-Pak odstranit a zkontrolovat stav, poté znovu reaplikovat – není

třeba snímat podkovu a podložku.

POZOR: V podmínkách vysokých teplot může Equi-Pak tvrdnout i za vyšších teplot, pokud je tedy problémem teplota,

aplikujte Equi-Pak ve více vrstvách pro redukci teploty.

POZOR: Equi-Pak se přilepí na koženou i plastovou podložku, stejně jako na některé typy polyetylenových podložek.

Pracovní postup:

S podložkou

- V okamžiku, kdy jste přibili podkovu a podložku na určené místo, zasuňte směšovací trubičku s Equi-Pakem mezi

střelku a podložku tak hluboko, jak je to možné. Trubičku s materiálem vytáhněte, jakmile je Equi-pak rovnoměrně rozptýlen.

POZOR: Pokud jsou patky velmi nízké nebo poškozené, můžete Equi-Pak aplikovat cca 1cm dírou v podložce, kterou uděláte v blízkosti vrcholu střelky.

- Equi-Pak po opuštění trubičky volně protéká a bezpečně zaplňuje všechny mezery. Zaplňte tak celý prostor až na

konec podložky. Jakmile Equi-Pak ztuhne, po cca 25 sek., můžete pustit kopyto.

- Sundejte směšovací trubičku, a pokud je to nutné celý proces opakujte.

Bez podložky

- Vystrouhejte chodidlo. Vydrhněte chodidlo dokonale denaturovaným alkoholem a ocelovým kartáčem. Pro vylepšení přilnavosti vysušte fénem nebo podobným horkovzdušným zařízením. Přibijte podkovu.

- Zvedněte kopyto střílem nahoru a aplikujte Equi-Pak podél okrajů podkovy, zaplňte chodidlo do požadované úrovně (zpravidla po základnu podkovy).

- Držte kopyto a jakmile Equi-Pak ztuhne, cca po 25 sek. ho pusťte.

Equi-Thane Super Fast – podkova na míru, prodloužení kopyt hříbat

Pozor:

- **Výrobky Vettec je nejlépe používat při teplotách 18 až 29 °C.**

- Ideální je používat při práci latexové nebo gumové rukavice.

- **Neohřívajte nebo nepracujte za tepla s těmito výrobky.**

- **Používejte pouze směšovací trubičky Vettec.**

Příprava tuby:

- K otevření tuby odstraňte štípacími kleštěmi špičku na značce. Vložte tubu do aplikační pistole. Před nasazením

směšovací trubičky promíchejte tubu vymáčknutím malého množství tmelu tak, aby se zajistilo, že obě složky tmelu budou vytlačeny rovnoměrně. Nasadte trubičku zatlačením a otočením ve směru hodinových ručiček.

- Po ukončení práce zaštipněte trubičku a ponechte ji jako víčko.

- Před další aplikací znovu promíchejte tubu a nasadte novou trubičku.

Příprava kopyta:

- Orašplujte a upravte kopyto jako obvykle. Odstraňte veškerý měkký a slabý materiál na spodní straně kopyta, zejména v oblasti bílé čáry.

- OSUŠTE DOKONALE KOPYTO za použití fénu nebo horkovzdušné pistole. Nepřehřívajte kopyto.

POZOR: pokud je kopyto mastné, otřete postiženou oblast hadrem namočeným v denaturovaném alkoholu opatrně

tak, aby nedošlo k zasáknutí do kopyta. Dokonale kopyto osušte. Nepoužívejte Aceton.

Podkova na míru:

- Zvedněte a držte kopyto nahoře kolmo k zemi a rozprostřete Super Fast tam, kde byste normálně umístili podkovu. Vrstva materiálu by měla být cca 2-3cm široká, 6mm silná a přesahovat cca 2-3cm na kopytní stěnu.

- Čekejte dokud Super Fast nezačne tuhnout a poté uvolněte kopyto, okolo 2_{1/2}-3 minut. Materiál bude pevný už před tím, ale nebude dokonale zaschlý.

- Rašplujte a strouhejte materiál do požadovaného tvaru.

- Můžete přidávat další vrstvu materiálu pro korekci kopyta nebo změnu úhlu patek. Pokud je předchozí vrstva znečištěná, orašplujte nečistoty a přidejte více Super Fastu.

- Pokud bude kůň pracovat na kluzkém povrchu, vyrašplujte na materiálu drážky pro zvýšení záběru.

Prodloužení kopyt hříbat:

POZOR: U hříbat mladších 30-ti dnů nenanášejte materiál na kopytní stěnu! Mohlo by to omezit přirozený růst kopyta.

- Držte kopyto kolmo vzhůru a naneste 6mm vrstvu Super Fastu okolo kopytní stěny.

- Držte kopyto 2-3 minuty a potom ho položte.

- Nanášejte další vrstvy dokud nevytvoříte požadovaný tvar a délku.

- Materiál můžete rašplovat a ořezávat jak je nutné.

Aplikace za nízkých teplot (pod 18 °C):

- skladujte tuby v teple např. v uzavřených půllitrových nádobách naplněných teplou vodou apod.

Aplikace za vysokých teplot (nad 30°C):

- Super Fast zasychá velmi rychle. Ke zpomalení zasychání skladujte materiál v chladícím boxu.

Omezení záruky: Při použití postupujte přesně dle instrukcí. Pokud Vaše použití přípravku není obsaženo v těchto instrukcích, kontaktujte dodavatele před použitím

výrobku. Kupující souhlasí, že v případech, kdy je výrobek Vettec shledán vadným, bude výlučnou kompenzací uživateli, v závislosti na volbě výrobce, výměna

vadného výrobku nebo vrácení uhrazené finanční částky adekvátně vadnému množství. Výrobce neručí za přímé, nepřímé, vedlejší nebo následné škody

způsobené použitím výrobku v rozporu s ustanoveními instrukcí bez ohledu na existující právní úpravy, včetně škod z nedbalosti.